

Articolo

3079



Categoria commerciale

CORSETTI

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 72%
ELASTAN 28%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE							COLORE / COLOUR	
1°	63-75	3°	83-91	5°	99-107	7°	115-123	
2°	75-83	4°	91-99	6°	107-115			

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio


Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

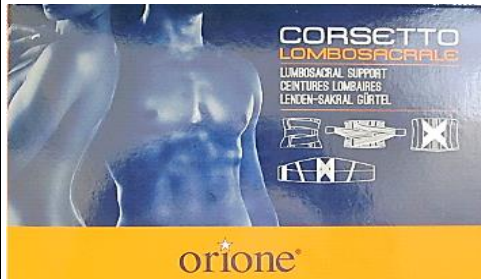

Aprire la fascia, sganciare i tiranti laterali. Posizionare la fascia al centro della zona lombo sacrale, agganciare i due pannelli frontali, successivamente agganciare i tiranti laterali, e regolare il sostegno dorsale.

Caratteristiche

Altezza cm 26
Pannello posteriore termosaldato ed inserto dorsale amovibile
Apertura/chiusura con doppio pannello
4 stecche dorsali

» Dolori della regione lombare.
» Lombalgie di origine dorsale.
» Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento.
» Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.