



LINEA

orione®

Articolo **3035**

Categoria commerciale

**FASCIA DIASTASI**

Colore	Comp. Tessile	
BEIGE	POLIAMMIDE	52%
	POLIESTERE	35%
	POLIURETANO	10%
	ELASTAN	3%
		100%



Taglie di vendita



Circ. vita in cm

80-89	90-99	100-109	110-119	120-129
1°	2°	3°	4°	5°

Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Aprire la fascia, sganciare i tiranti frontali. Posizionare la fascia con apertura al centro dell'addome. Avvicinare i due pannelli frontali e successivamente calibrare i tiranti</p>	» Diastasi dei retti addominali	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>
	<p><b>Caratteristiche</b></p> <p>Altezza cm 27 Doppi tiranti incrociati sul dorso 4 stecche dorsali</p>		