



LINEA



Articolo **5010**


Categoria commerciale

**Alza water**

Dettagli Tecnici / Technical details

Colore **Bianco**  
Color **White**

Materiale  
Polipropilene

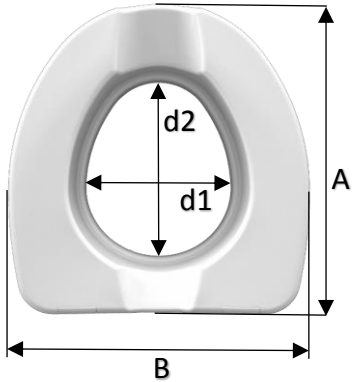

- A - 40,5 cm
- B - 36,5 cm
- D - 10,0 cm
- d1 - 25,5 cm
- d2 - 20,5 cm



<u>Istruzioni lavaggio</u>	Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro. L'alza water può essere immerso totalmente nell'acqua oppure sanificato ( senza le staffe di bloccaggio ) in autoclave alla temperatura di 85° per 1 minuto.
<u>Cleaning Instructions</u>	All parts can be cleaned with warm water and a neutral cleanser. Alternatively, the seat can be totally immersed in water and/or can be sanitized (without brackets) in an autoclave at 85°C for 1 minute.

Confezione / Package

IT Istruzioni per l'installazione

Precauzioni



Capovolgere l'alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guidelaterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate sull'alzawater. Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l'accostamento dell'alzawater sulla ceramica del wc. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare sulla ceramica del wc l'alzawater con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc. Girare le manopole in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l'alzawater si aben fissato al wc in senso orizzontale, ovvero che non si sposti lateralmente. **ATTENZIONE:** Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo, è però importante non continuare a girare la manopola qualora la staffa sia già nella posizione di contatto con il wc.

Non superare la portata massima di 225 kg. Assicurarsi sempre prima dell'uso che l'alzawater sia fissato al wc.

GB Installation instruction

Cautions

Attach the 2 x L-shaped brackets to the raised toilet seat: tum model upside down on a flat surface and insert the l-shaped brackets into the slots. Push gently on the bracket and tum the knob clockwise until the thread engages. Position the brackets leaving a greater width than that of the toilet bowl. Lift up existing toilet seat and place the seat directly onto the toilet bowl positioning the brackets towards the rear and the lip against the front of the bowl. Turn the adjustment knobs clockwise until a resistance is felt and the seat does not move from side to side. Ensure seat is firmly fixed before using. **ATTENTION:** The side-locks have been especially designed to allow for easy tightening tuming should not be continued once a resistance is felt.

Do not exceed maximum user weight: 225 kg/ 496 lb. Always ensure the toilet seat is securely fixed before using. Do not hold onto seat for support white rising/lowering.