



Categoria commerciale

CORSETTI

Articolo	3080
----------	-------------

Colore	Comp. Tessile	
BIANCO	POLIAMMIDE	45%
	POLIESTERE	37%
	COTONE	9%
	ELASTAM	9%

Colore	Comp. Tessile	
BEIGE	COTONE	36%
	POLIAMMIDE	32%
	ELASTAN	14%
	POLIESTERE	10%
	VISCOSA	8%
		100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	65-74	L	85-94
M	75-84	XL	95-104
		XXL	105-114

Lavaggio				
Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.
Istruzioni lavaggio		Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.		

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Aprire la fascia e posizionare la fascia al centro della zona lombo sacrale. Agganciare i due pannelli frontali</p>	<p>» Dolori della regione lombare. » Lombalgie di origine dorsale. » Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento. » Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>
	<p><u>Caratteristiche</u></p> <p>Altezza cm 27 Rinforzo con incrocio sul dorso 8 stecche automodellanti</p>		