

Articolo **3501**



Categoria commerciale

FASCE POST-OPERATORIE

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE 79%

ELASTAN 13%

POLIESTERE 8%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Aprire completamente la cintura, indossare e richiudere prima un pannello e dopo l'altro.</p>	<p>In campo medico-chirurgico, alle necessità di coloro che hanno subito interventi chirurgici e devono indossare fasce contenitive a tensione differenziata, regolabili ed anatomiche. Sono raccomandate anche come cinture post-parto.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>
	<p>Caratteristiche</p> <p>Altezza fascia = cm 24</p>		