

Articolo **1429**

Categoria commerciale **GUAINETTE PRE PARTO**

Colore di vendita

BIANCA

Comp. Tessile

COTONE 62%
POLIAMMIDE 29%
ELASTOMERO 9%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		6°		85		COLORE / COLOUR
2°	65	4°	75	6°	85	<input type="checkbox"/>
3°	70	5°	80			

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Lavare con acqua tiepida e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi; per asciugare togliere più acqua possibile, arrotolando il prodotto in un asciugamano. Appendere all'ombra.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale slip avendo cura di posizionare la banda elastica sotto pancia.

Indicazioni

Sorregge la pancia grazie alla banda elastica sotto il ventre.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.