

Articolo

9340



Categoria commerciale

CUSCINI PER ABDUZIONE SPALLA

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

SPUGNA 40%
POLIESTERE 35%
COTONE 25%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

AMBIDESTRO - AMBIDEXTER

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio


Lavare con panno umido e sapone neutro. Evitare l'immersione diretta nell'acqua; fare asciugare lontano dalle fonti di calore.

Astuccio



Modalità di applicazione

L'articolo è composto da 2 parti principali (reggibraccio+cuscino abduttore) ed è ambidestro per l'indossamento procedere come segue. Separare la tasca reggi braccio dal cuscino abduttore. **CUSCINO ABDUTTORE** Posizionare il cuscino all'altezza della vita con la parte curva a contatto del corpo. Fissarlo attorno alla vita tramite l'apposita cinghia che deve essere posizionata nei passanti e chiusa su se stessa. Per ottenere la corretta angolazione, in base alle specifiche esigenze, attenersi alle figure riportate, variando in altezza il posizionamento del cuscino. **REGGIBRACCIO**: aprire il reggibraccio e posizionare l'avanbraccio; richiudere lo strap centrale e posizionare il pollice nell'apposito regi pollice. Regolare la lunghezza della cinghia a tracolla e agganciare la clip di chiusura al reggibraccio. Regolare la cinghia della tracolla. Fissare il reggibraccio al cuscino abductione.

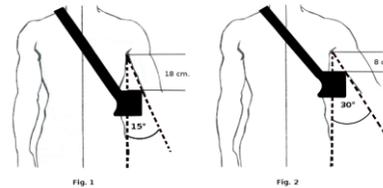

Indicazioni

Trattamento post-operatorio della spalla a seguito della ricostruzione della cuffia dei rotatori.
Trattamento di abductione nella fase riabilitativa.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.