

Articolo

304



Categoria commerciale

SLIP PER ERNIOPLASTICA

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE 48%  
 POLIAMMIDE 29%  
 GOMMA 18%  
 ELASTAN 5%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori



Modalità di applicazione

Indossare come un normale slip

Indicazioni

Appositamente studiato come slip contenitivo post-operatorio in caso di interventi di ernioplastica.  
 » Agevola la precoce ripresa dell'attività fisica  
 » Assoluta libertà di movimento  
 » Riduce il dolore post-operatorio

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.