



LINEA

orione®

Articolo

3083



Categoria commerciale

CORSETTI

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE	60%
POLIESTERE	25%
ELASTAN	15%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	75-83	L	91-99	XXL	107-115
M	83-91	XL	99-107		

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze



orione®

Aprire la fascia, sganciare i tiranti laterali. Posizionare la fascia al centro della zona lombo sacrale, agganciare i due pannelli frontali, successivamente agganciare i tiranti laterali, e regolare il sostegno dorsale.

Caratteristiche

Altezza cm 26
Pannello posteriore termosaldato
Apertura/chiusura con doppio pannello
4 stecche dorsali

» Dolori della regione lombare.
» Lombalgie di origine dorsale.
» Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento.
» Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.