

Articolo

3097



Categoria commerciale


FASCE POST-OPERATORIE

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIESTERE 34%
 POLIAMMIDE 30%
 COTONE 26%
 ELASTAM 10%
 100%

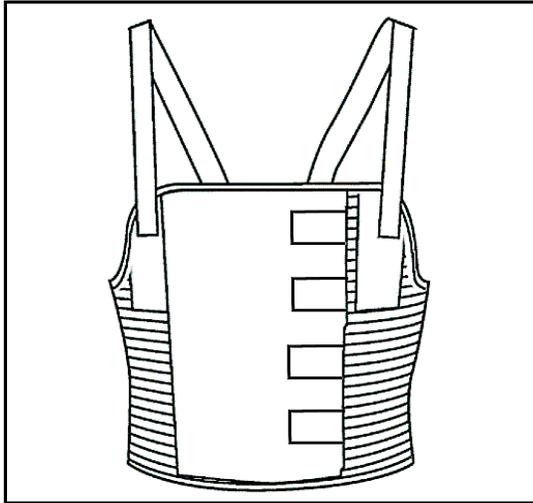

Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR	
S	78-88	L	98-108	XXL	119-128
M	89-98	XL	109-118		

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

Indossamento

Indicazioni

Avvertenze



Posizionare la cintura regolando la lunghezza delle bretelle (amovibili) tramite regolazione sul davanti. Accertarsi del corretto posizionamento dell'incavo della cintura sotto le ascelle. Regolare gradualmente la chiusura della cintura.

Realizzata con tessuto elastico ad alta traspirazione. Particolarmente indicata nel post-operatorio, interventi di chirurgia toracica e cardiaca.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.