

Articolo **4119**



Categoria commerciale

GINOCCHIERE IN TESSUTO TRI-STRATO

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

Esterno

POLIAMMIDE 88%

ELASTAN 12%

Interno

COTONE 65%

POLIAMMIDE 28%

ELASTAN 7%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE	COLORE / COLOUR
TAGLIA UNICA ONE SIZE	

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Asciugatura piatta.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Attenzione la ginocchiera è ambidestra. La parte siliconata antiscivolo deve sempre essere posizionata in alto nell'indossamento. Aprire completamente la ginocchiera. Con la gamba distesa posizionare il foro sulla rotula. Richiudere la parte inferiore. Controllare l'esatto posizionamento delle stecche (devono essere parallele) e del foro rotuleo. Procedere chiudendo la parte superiore. Attenzione: una eccessiva compressione può produrre una non corretta circolazione sanguigna.</p>	<p>Distorsioni. Lievi o moderate tensionilegamentose.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>