


Articolo

5708



Categoria commerciale

GINOCCHIERE IN NEOPRENE TRASPIRANTE

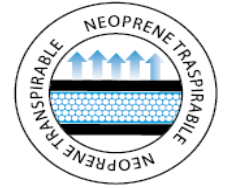

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

NEOPRENE 70%
 NYLON 30%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR	
S	34-36	L	38-41	XXL	44-47
M	36-38	XL	41-44		

Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Lavare con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare lontano da fonti di calore.

Astuccio



Modalità di applicazione

Per indossare la ginocchiera si consiglia di non esercitare trazione dal foro rotuleo, ma unicamente dall'estremità superiore della ginocchiera; in caso contrario si potrebbe danneggiare.

Indicazioni

Prevenzione e trattamento lievi traumi del ginocchio. Prevenzione instabilità rotulea nella pratica sportiva. Nelle modeste instabilità rotulee. Coadiuvante nella riabilitazione post-operatoria e post-traumatica del ginocchio e nelle patologie come tendiniti, distorsioni e strappi muscolari.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico. Si sconsiglia l'uso in casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.