



LINEA

orione®

Articolo

3055



Categoria commerciale

FASCIA PER STOMIZZATI

Colore di vendita

BEIGE

Comp. Tessile

POLIAMMIDE	91%
ELASTAN	9%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S/M	80-110	L/XL	120-140
M/L	105-125		

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.



Asciugare nell'asciugatrice con il programma delicato.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.


Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

Vedere foglio istruzioni inserito nella confezione.

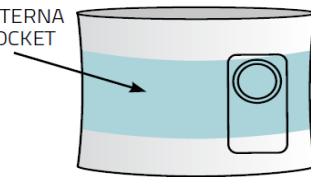TASCA INTERNA
INNER POCKET

Pazienti stomizzati.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO

PRIMA DI INDOSSARE, OSSERVARE ATTENTAMENTE LA FASCIA !!!


La fascia è composta da 2 parti unite:

- La parte interna con il foro
- La parte esterna

La parte alta della fascia è quella con indicati internamente sul bordo i simboli del lavaggio.

INDOSSAMENTO

- 1 – Indossare la fascia, facendola passare dalle gambe.
Tirlarla verso l'alto sino all'altezza della sacca (il foro interno deve trovarsi all'altezza della sacca).
- 2 – Prendere il bordo inferiore della parte esterna della fascia, risvoltarlo e portarlo in alto sino all'altezza del petto. La fascia si troverà nella posizione indicata dal disegno.

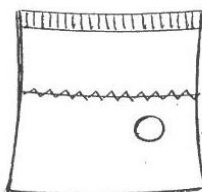

PARTE SUPERIORE

PARTE INFERIORE

- 3 - Far passare la sacca per stomia attraverso il foro.
- 4 - Riprendere la parte esterna precedentemente alzata (Punto 2) e riportarla in basso distendendola.
- 5 - Inserire la parte inferiore della sacca per stomia nel taschino situato nel bordo inferiore dello strato esterno