

Articolo **9341**



Categoria commerciale

**CUSCINI PER ABDUZIONE SPALLA**

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

SPUGNA 40%  
 POLIESTERE 35%  
 COTONE 25%  
 100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE	COLORE / COLOUR
UNICA - ONE SIZE	
AMBIDESTRO - AMBIDEXTER	

Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Lavare con panno umido e sapone neutro. Evitare l'immersione diretta nell'acqua; fare asciugare lontano dalle fonti di calore.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>L'articolo è composto da 2 parti principali (reggibraccio+cuscino abduttore) ed è ambidestro per l'indossamento procedere come segue. Separare la tasca reggi braccio dal cuscino abduttore.</p> <p><b>CUSCINO ABDUTTORE:</b> posizionare il cuscino all'altezza della vita, con la parte curva a contatto del corpo; fissarlo attorno alla vita tramite apposita cinghia che deve essere posizionata nei passanti e chiusa su se stessa; per ottenere la corretta angolazione in base alle proprie esigenze, posizionare il cuscino con il lato inclinato come da figura: Lato A=45° - lato B=60°.</p> <p><b>REGGIBRACCIO:</b> aprire il reggibraccio e posizionare l'avanbraccio; richiudere lo strap centrale e posizionare il pollice nell'apposito regi pollice. Regolare la lunghezza della cinghia a tracolla e agganciare la clip di chiusura al reggibraccio. Regolare la cinghia della tracolla. Fissare il reggibraccio al cuscino abduzione.</p>	<p>Trattamento post-operatorio della spalla a seguito della ricostruzione della cuffia dei rotatori.</p> <p>Trattamento di abduzione nella fase riabilitativa.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo.</p> <p>Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>