

Articolo

**107**



Categoria commerciale

**PLANTARE INTERO RIVESTITO**

Colore di vendita


TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%

Fodera:

POLIESTERE

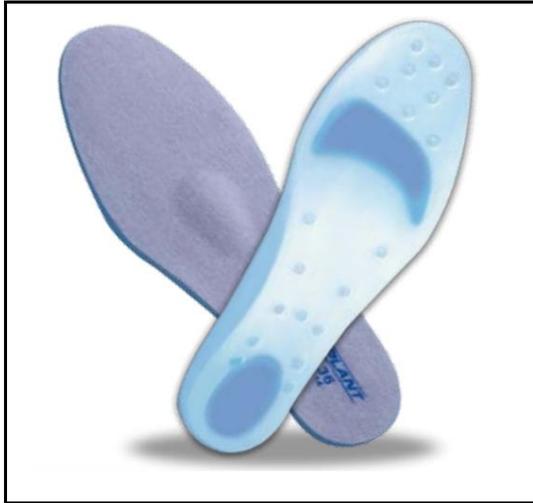

Taglie di vendita

<b>0°</b>	35-36	<b>2°</b>	39-40	<b>4°</b>	43-44
<b>1°</b>	37-38	<b>3°</b>	41-42	<b>5°</b>	45-46

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida  
Non strizzare  
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

« Talloniti, talalgie, borsiti, tendiniti, metatarsalgie, spina calcaneale, piede diabetico, fascite plantare  
« Situazioni post-operatorie «  
Distribuiscono la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta.  
« La confezione contiene 2 pz

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.  
Verificare che la misura scelta sia quella corretta.  
Il dispositivo non è sterile.  
Non posizionare a contatto della pelle lesa. Il plantare deve essere utilizzato all'interno della calzatura

Caratteristiche

Plantare rivestito in tessuto elastico forato.  
Scarico metatarsale/calcaneale e goccia metatarsale.  
Sostegno volta longitudinale