

Articolo

4110



Categoria commerciale

SUPPORTO SOTTOROTULEO

Colore di vendita

ARANCIONE

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 72%
POLIESTERE 28%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE	COLORE / COLOUR
TAGLIA UNICA ONE SIZE	


Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Do not dry	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo.

Astuccio

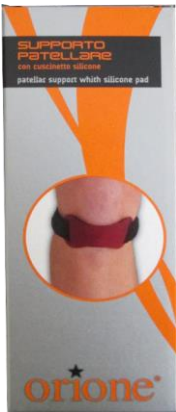

Modalità di applicazione

Separare completamente i cinghietti di regolazione. Il cuscinetto interno ed il supporto stesso che sono a lieve forma di "V" devono essere posizionati come da illustrazione ("V" verso l'alto). Posizionare il supporto sulla gamba. Il cuscinetto interno deve essere appena sotto la rotula. Con il ginocchio in flessione (utilizzatore seduto) tendere i due cinghietti di fissaggio sino ad ottenere la compressione richiesta, assicurandosi che il supporto sia perfettamente centrato sul ginocchio. Provare a camminare e se la compressione è eccessiva regolare i cinghietti.



Indicazioni

Ove occorre supporto sottorotuleo. Morbo di Osgood-Schlatter

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.