



LINEA

orione®

Articolo

9118



Categoria commerciale

COLLARE SEMIRIGIDO RIVESTITO IN MAGLINA H. CM 8

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

Espanso

POLIURETANO 100%

Fodera

COTONE 100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	30-35	L	40-45
M	35-40		

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Lavare a mano con acqua e sapone. Scaicquare con acqua. Asciugare lontano da fonti di calore. Non torcere.

Astuccio



Modalità di applicazione

Posizionare il collare con la chiusura a strappo nella parte posteriore. Regolare la chiusura in modo tale da garantire un uso confortevole e un corretto sostegno.

Indicazioni

Lievi colpi di frusta. Artrosi cervicale. Torcicollo.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.