



LINEA

orione®

Articolo

9651



Categoria commerciale

REGGISENI MASTECTOMIA

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE	91%
ELASTAN	9%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE			COLORE / COLOUR		
S	74-80	L	86-92	XXL	96-106
M	80-86	XL	92-96		

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Asciugare nell'asciugatrice con il programma delicato.	Non stirare.	Non lavare a secco.

Istruzioni lavaggio


Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio




Modalità di applicazione

Indossare come un normale reggiseno.

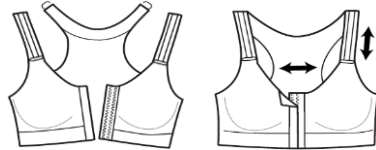

Possibilità di aprire completamente il reggiseno, per un facile indossamento da allattati.

Pratica apertura regolabile frontale e spalline regolabili.

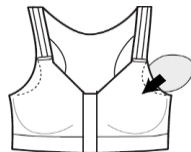

Possibilità di inserire protesi di riempimento provvisorie.

Indicazioni

Reggiseno per post-intervento di mastectomia. Interventi al seno.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.