



LINEA

orione®

Articolo

3082



Categoria commerciale

CORSETTI

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

COTONE 40%  
 POLIESTERE 35%  
 ELASTAN 25%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.




Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

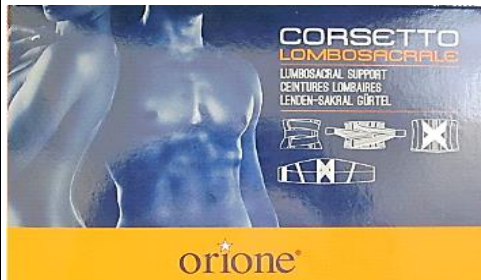

Modalità di applicazione

Corsetto in tessuto elastico con chiusura / apertura frontale. Coadiuvato da due tiranti di rinforzo per calibrare il supporto sul dorso. Stecche posteriori. Altezza 24 cm. Aprire la fascia, sganciare elastici laterali. Posizionare la fascia al centro della zona lombo sacrale, agganciare i due pannelli frontali, successivamente agganciare i tiranti laterali, regolando così il supporto dorsale. Altezza cm 26

Indicazioni

» Dolori della regione lombare.  
 » Lombalgie di origine dorsale.  
 » Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento.  
 » Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.