

Articolo

240



Categoria commerciale

POLSIERE / ORTESI POLSO

Colore di vendita

BEIGE

GRIGIO-ARANIO

Comp. Tessile

Interno

COTONE

93%

ELASTAN

7%

Esterno

POLIAMMIDE

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	14-18	AMBIDESTRO AMBIDEXTER	
L	18-22		


Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio


Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

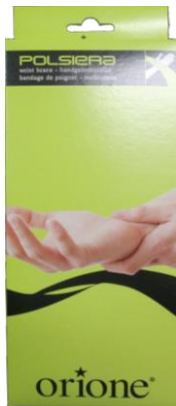

Modalità di applicazione

1) Allentare completamente i cinghietti della polsiera. 2) Infilare la mano posizionando correttamente il pollice. ATTENZIONE: la stecca interna della polsiera deve trovarsi sulla parte inferiore della mano. 3) Regolare il cinghietto dell'avanbraccio e fissarlo. 4) Far passare attraverso la fibbia un'estremità del cinghietto a "V" e fissarlo nella posizione desiderata. 5) Prendere il cinghietto a "V" dall'estremità del velcro, tenderlo e farlo aderire sopra il polso, ottenendo la regolazione desiderata. 6) Chiudere i 2 piccoli cinghietti sul palmo della mano, regolando tensione e direzione.

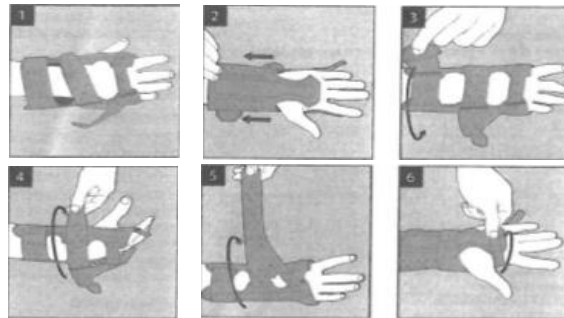

Indicazioni

Instabilità dei legamenti, forme artritiche, distorsioni, tendiniti, sindrome del tunnel carpale, a seguito di interventi chirurgici.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.