

Articolo

242



Categoria commerciale

ORTESI PER IMMOBILIZZAZIONE DEL POLLICE

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

NYLON	26%
PLASTICA	43%
SCHIUMA	6%
POLIESTERE	25%
	100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE	CIRCONFERENZA POLSO CM	COLORE / COLOUR
S	13 -16 cm	AMBIDESTRO AMBIDEXTER
M	16 -19 cm	
L	19 -26 cm	

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Aprire i cinghietti , indossare il dispositivo e richiudere i cinghietti.

Indicazioni

- » Rizoartrosi
- » Tendiniti e distorsioni del pollice
- » Immobilizzazione pollice

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.