

Articolo

9338



Categoria commerciale

IMMOBILIZZATORE BRACCIO/SPALLA

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

SCHIUMA	40%
POLIESTERE	30%
POLIAMMIDE	30%
	100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE	CIRCONFERENZA	CIRCUMFERENCE	COLORE / COLOUR
S	fino a 90 cm	till 90 cm	AMBIDESTRO
L	oltre 90 cm	over 90 cm	AMBIDEXTER

Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Lavare a mano a 30° - Non stirare - Non candeggiare - Non lavare a secco - No asciugabiancheria.

Astuccio



Modalità di applicazione

Aprire la confezione ed estrarre la fascia di bloccaggio che si trova ripiegata all'interno della tasca dell'immobilizzatore. 1) Prendere l'immobilizzatore e posizionarlo sulle spalle ed il torace. Le due bretelle devono essere penzolanti sul retro; la tasca deve trovarsi posizionata frontalmente sul torace. 2) Posizionare il braccio nella tasca e regolare la chiusura della tasca a seconda delle necessità. 3) Prendere le due estremità inferiori delle bretelle ( penzolanti sul retro ) ed, incrociandole, fissarle sul davanti delle tasca all'altezza desiderata. 4) Prendere la fascia di bloccaggio e posizionarla attorno al busto all'altezza desiderata, avendo l'accortezza di fissare sulla tasca la parte tagliata del velcro.

Indicazioni

Trattamento post-operatori, lussazioni e frattura omero, lussazioni spalla. In tutti i casi ove si rende necessaria la limitazione del movimento del braccio e spalla.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.