

AVVERTENZE

Accertarsi che la misura e la versione Destra/Sinistra siano corrette.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per scelta del modello, modo e tempo di utilizzo.

Attenzione il dispositivo medico non è sterile.

Non posizionare a contatto della pelle lesa.

Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.

Non modificare la struttura del D.M. per non alterare la funzionalità dello stesso.

I materiali utilizzati escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al personale medico.

INDICAZIONI

Stabilizzazione ed immobilizzazione del polso.

Distorsioni, forme artritiche, tendiniti, tunnel carpale.

Affaticamenti dovuti ad attività lavorative o durante attività sportiva.

CONTROINDICAZIONI

Slogature gravi che richiedano l'immobilizzo totale.

Fratture.

PRECAUZIONI

In caso di gonfiore o pallore anormale della pelle o sofferenza, si raccomanda di interrompere l'utilizzo e rivolgersi al personale medico.

Il supporto deve essere regolato perfettamente ed in modo confortevole senza interferire con la circolazione.

Assicurarsi che le eventuali ferite o zone infette siano preventivamente curate.

ISTRUZIONI LAVAGGIO




Pulire con panno umido e sapone neutro. **Non immergere in acqua.**

SMALTIMENTO

Smaltire secondo le norme previste dalle legislazioni vigenti.

INDOSSAMENTO

- 1) Tirare la rotella verso l'alto. Sentirete un click (vedi Fig. A)
- 2) Allargare la polsiera per poter introdurre la mano (vedi Fig. B-C)
- 3) Spingere la rotella sino al click (vedi Fig. D)
- 4) Regolare per stringere ruotando la rotella in senso orario (vedi Fig. E)
- 5) Se la regolazione è troppo stretta, tirare la rotella verso l'alto e procedere con una nuova regolazione.
- 6) Modellare eventualmente la stecca palmare in modo che aderisca perfettamente alla fisionomia del polso.

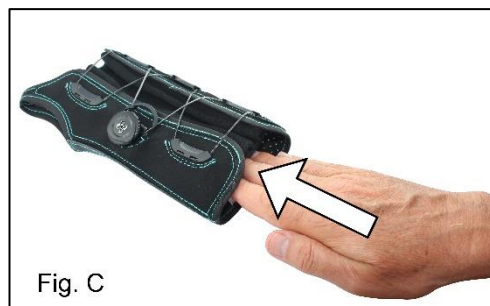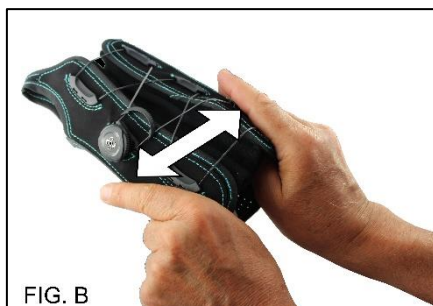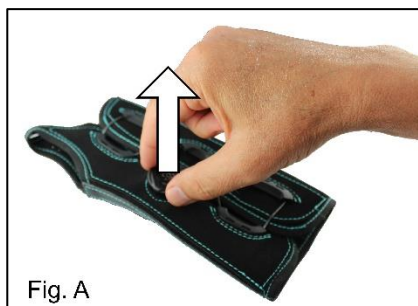

COMPOSIZIONE

Poliuretano 45%, Poliestere 15%, Maglina 10%, Polipropilene 7%, Alluminio 6%, Nylon 5%, ABS 5%, Polietilene 4%, PVC 3%

Distribuito da:

SAFTE S.p.A. Via Adamello, 13 10093 Collegno (TO) Italy - Tel. 011.4038111 - Fax 0114038116 – info@safte.it – www.safte.it