

Articolo

250


Categoria commerciale

EPICONDILITE

Colore di vendita

VERDE

Comp. Tessile

 POLIAMMIDE 72%
 POLIURETANO 28%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE

 TAGLIA UNICA
 ONE SIZE

 AMBIDESTRO
 AMBIDEXTER

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio


Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Posizionare il bracciale 3 cm. sotto il gomito.

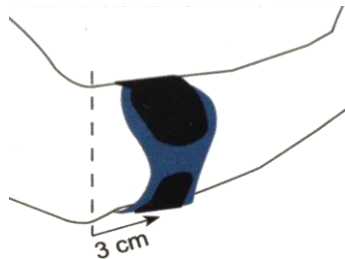

Indicazioni

 » Particolarmente indicati per epicondilite
 » Gomito del tennista

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.