



LINEA

orione®

Articolo

515



Categoria commerciale

SLIP PER ERNIA

Colore di vendita

BIANCO

AZZURRO

Comp. Tessile

COTONE

88%

ELASTAN

12%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105		

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio


Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori


Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

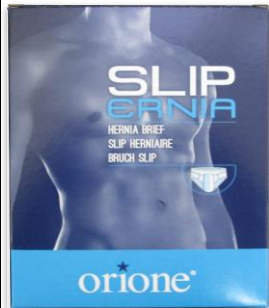

Cuscinetti compressivi inclusi nella confezione

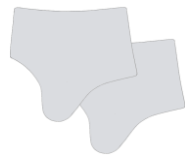

Indossare come un normale slip. Accertarsi del corretto posizionamento dei cuscinetti compressivi.

- » Contenzione di ernie inguinali riducibili.
- » Postoperatori di interventi di ernia inguinale prevengono notevolmente l'eventuale recidiva', accelerano nell'intervento "free tension" la formazione di tessuto cicatriziale riducendo notevolmente i tempi per una normale ripresa dell'attività'.
- » Aiutano nella riduzione del dolore post-operatorio.
- » Preventivi nelle attività lavorative e sportive.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.