

Articolo

200



Categoria commerciale

POLSIERE / ORTESI POLSO

Colore di vendita

BEIGE


Comp. Tessile

POLIESTERE 56%  
POLIAMMIDE 26%  
ELASTAN 18%

100%



Taglie di vendita

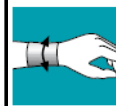

TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA  
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Aprire la polsiera, posizionare sul polso e richiudere su se stessa, applicando il giusto tiraggio senza impedire la normale circolazione sanguigna.

Indicazioni

Polsiera elastica universale supporta senza comprimere garantendo sostegno temporaneo e prevenendo movimenti eccessivi. Ampia ed elastica con bordi rifiniti. Spugna di cotone all'interno. Semplice chiusura a strappo.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.