



LINEA

orione®

Articolo

9336



Categoria commerciale

REGGIBRACCIO - IMMOBILIZZATORE BRACCIO/SPALLA

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

POLIESTERE	70%
POLIAMMIDE	30%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	35	L	48
M	44		

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



L'indumento può essere pulito con solventi percloroetilene, idrocarburi, R113 ed R11.



Asciugare nell'asciugatrice con il programma delicato.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Aprire la bretella, inserire il braccio nella culla, regolare l'altezza a cui si vuole bloccare l'arto facendo scorrere la bretella all'interno delle fibbie. Richiudere la bretella tramite il velcro.

Indicazioni

Sostegno dell'arto superiore.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.