

Articolo **3040**



Categoria commerciale

CORSETTI

Colore	Comp. Tessile
BIANCO	POLIAMMIDE
	ELASTAN
	POLIESTERE

Colore	Comp. Tessile
BEIGE	POLIAMMIDE
	POLIESTERE
	COTONE
	ELASTAN

50%
25%
25%
100%

30%
30%
25%
15%
100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE	
S	65-74
M	75-84
L	85-94
XL	95-104

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Aprire la fascia, sganciare i tiranti laterali. Posizionare la fascia al centro della zona lombo sacrale, agganciare i due pannelli frontali, successivamente agganciare i tiranti laterali, e regolare il sostegno dorsale.</p>	<p>» Dolori della regione lombare. » Lombalgie di origine dorsale. » Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento. » Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>
	<p>Caratteristiche</p> <p>Altezza cm 27 Doppi tiranti incrociati sul dorso 4 stecche dorsali</p>		