



LINEA

orione®

Articolo **3057** **CE**

Categoria commerciale **FASCIA PER STOMIZZATI**

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

COTONE 45%  
POLIESTERE 35%  
ELASTAN 20%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR			
S	67-76	L	87-96	XXL	107-116
M	77-86	XL	97-106	XXXL	117-126

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura media	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
		<p>Pazienti stomizzati, aiuta a prevenire formazioni di ernie stomali.</p> <p><b>Caratteristiche</b></p> <p>Tessuti particolarmente confortevoli al tatto per riduzione sfregamenti e arrossamenti. Aiuta a supportare in modo ottimale la sacca, ridistribuendone il peso. Compensa i muscoli addominali, aiutando a prevenire ernie stomali. Fascia composta da 2 pezzi: pannello posizionabile con foro regolabile + fascia di stabilizzazione con pratico copri sacca</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>