



LINEA

orione®

Articolo

410



Categoria commerciale

FASCIA MULTIUSO

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIESTERE	51%
POLIAMMIDE	25%
ELASTOMERO	14%
COTONE	10%
	100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

84 cm x 6 cm

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Inserire l'arto all'interno dell'anello, e avvolgere la benda su se stessa richiudendo la fascia con il velcro.

Indicazioni

Per bendaggi vari, ginocchio, polso e caviglia.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.