

Articolo

556



Categoria commerciale

SLIP PER STOMIZZATI (Uomo)

Colore di vendita

BIANCO


Comp. Tessile

COTONE 88%
ELASTAN 12%






100%



Taglie di vendita

	TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR	
	2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	

Lavaggio

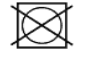				
Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.


Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale slip, avendo cura di posizionare la sacca all'interno della tasca.

TASCA INTERNA
INNER POCKET

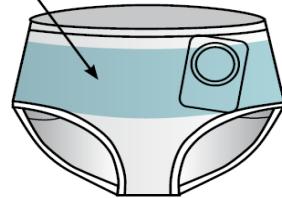

Indicazioni

Gli slip per stomia hanno una particolare tasca realizzata nel medesimo tessuto. La tasca interna è adatta per le diverse posizioni della stomia, sia a destra che a sinistra. Il corretto sostegno della sacca viene ottimizzato, evitando altresì il contatto della sacca sulla pelle e riducendo così il rumore di sfregamento. Gli slip per stomia hanno un'ottima vestibilità e comfort. Aiutano a sentirsi più sicuri, garantendo riservatezza nelle attività quotidiane.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.