

Articolo

536



Categoria commerciale

SLIP PER ERNIA DONNA

Colore di vendita

NOCE


Comp. Tessile

COTONE 86%  
ELASTAN 14%

100%



Taglie di vendita

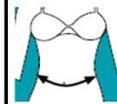

TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

2°	65-69	4°	75-79	6°	85-89	8°	95-99
3°	70-74	5°	80-84	7°	90-94		



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze



Cuscinetti compressivi inclusi nella confezione



Indossare come un normale slip. Accertarsi del corretto posizionamento dei cuscinetti compressivi.

- » Contenzione di ernie inguinali riducibili;
- » Postoperatori di interventi di ernia inguinale accelerano la ripresa dell'attività;
- » Riducono gli effetti di una eventuale recidiva;
- » Preventivi nelle attività lavorative e sportive.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.